

AV 1000

Box de grattage



MODE D'EMPLOI

Cher client,

L'AV1000 a été conçue pour des postes produisant beaucoup de poussière. Afin d'optimiser ses performances, il est donc recommandé de suivre les instructions suivantes :

Le signe CE qui apparaît sur la fiche signalétique à l'arrière du box atteste, que l'AV 1000 est conforme aux dispositions directives et normes appliquées suivantes :

89/336	directive EMV
73/23	directive basse tension
93/68	certification CE
89/392	directive pour machines

Toute modification extérieure à notre unité de production fait perdre les garanties de cette présente déclaration.

X²⁰⁰⁰

Kurt Zubler

**CERTIFICAT DE
CONFORMITE**




**INSTALLATION ET
BRANCHEMENTS**

- Placer l'AV1000 sur un plan de travail convenable ou utiliser le piétement (vendu en option)
- Pour passer le câble de la pièce à main à travers le fond, vous n'avez pas besoin de le démonter. Retirer les 2 anneaux de passage de son logement (un à l'intérieur, l'autre à l'arrière). De l'intérieur du box, faites passer la prise et le câble de la pièce à main par le trou. Les anneaux sont prédécoupés. Placer les anneaux sur le câble puis dans leur logement respectif.
- Connecter l'AV1000 à l'air comprimée (nous recommandons 3 bars).
- Brancher la pédale servant au déclenchement de l'air comprimée sur la connexion pédale soufflette..

AV 1000

Box de grattage

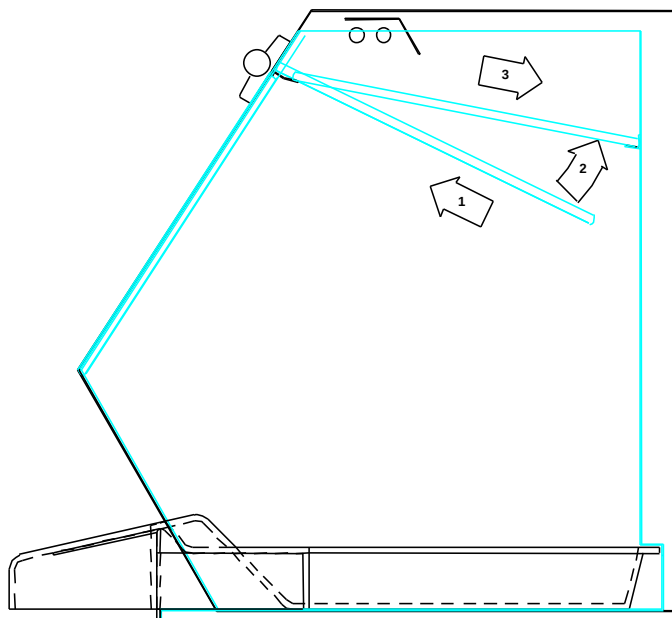

MISE EN PLACE DE LA LAMPE

- insérer le néon dans la prise et clipser le sur son support ;
- Monter la glace de protection de la lampe dans une position semi verticale pour la faire reposer ensuite sur les 2 rails
- **Il est conseillé de la retirer en cas de transport.**

- activer l'éclairage en mettant sous tension l'inter vert
- la soufflette d'air comprimé se trouvant à gauche de la cheville est commandé par la pédale
- le réglage de la hauteur de la cheville se fait à l'aide de la vis- molette placée dessous
- le nettoyage complet du box est possible en soulevant la cheville, en retirant le capteur de poussière. Ainsi le fond du box peut se retirer facilement.

MISE EN MARCHÉ ET NETTOYAGE