

“VK100”

- GENERATEUR DE VAPEUR -

Ce générateur de vapeur est le plus compact de la gamme “IV line”. Idéal pour être placé sur un banc de travail, il a été conçu pour être simple d'utilisation, solide et compact. Il ne nécessite pas d'être relié au réseau d'eau. Il est très simple à installer et à utiliser: il suffit de remplir le réservoir avec de l'eau déminéralisée et de brancher le câble d'alimentation. Après l'avoir allumé il suffit d'attendre 8 minutes et l'appareil est prêt pour le travail, il suffit ensuite de rajouter de l'eau quand l'indique le signal lumineux jaune.

Réservoir d'eau déminéralisée

- Réservoir indépendant, qui permet de déplacer l'appareil.
- Remplissage facile grâce à l'entrée du réservoir d'un diamètre de: Ø.65 mm.
- Possibilité de rajouter l'eau dans le réservoir sans arrêter l'appareil.

Pistolet

SORTIE VAPEUR

- Pratique, avec une parfaite isolation thermique.
- Ergonomique, très facile à utiliser.
- Levier de commande « Sensor » .
- Bouton de sécurité pour l'actionner.

Voyants lumineux de contrôle

- Le voyant vert indique que l'appareil est allumé.
- Le voyant jaune indique le manque d'eau dans le réservoir.
- Le voyant bleu indique le fonctionnement de la pompe de l'eau.
- Le voyant rouge indique le fonctionnement de la résistance de chauffe.

